


Смена настроек даты и времени на  
профессиональном приборе  
для измерения МНО из капиллярной крови  
**CoaguChek<sup>®</sup> XS Plus**






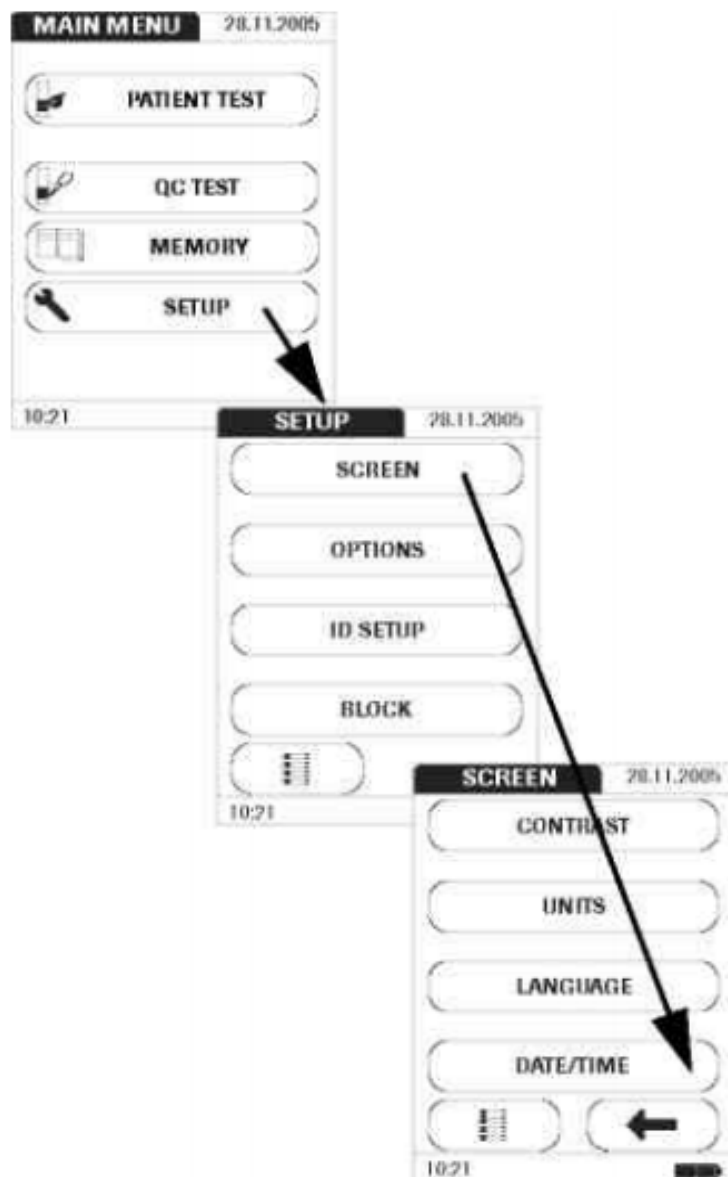

## Установка даты


При первом включении прибора (или после длительного периода отсутствия питания) автоматически появляется поле ввода даты. Дату (и время) следует ввести прежде чем возможно будет продолжить работу с прибором. Если вы в дальнейшем захотите изменить дату, действуйте в следующей последовательности:

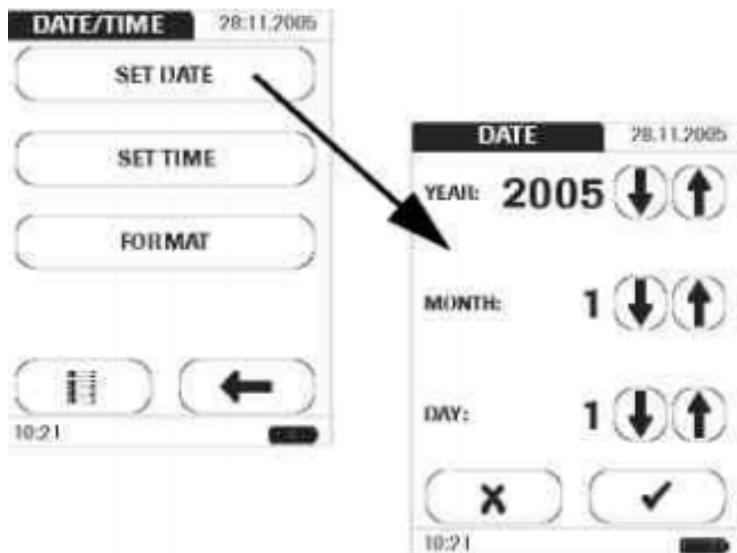


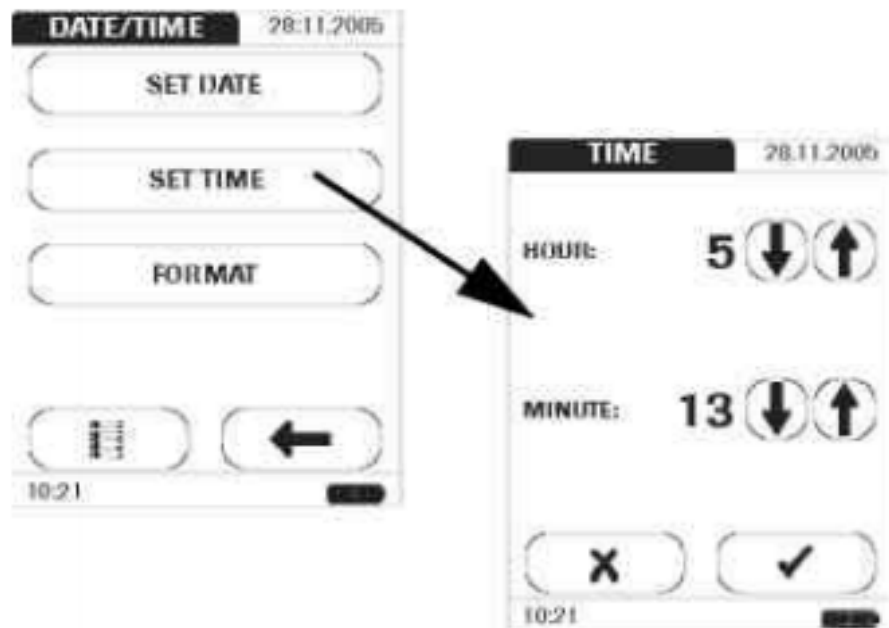
- 1 На экране главного меню коснитесь кнопки **SETUP (НАСТРОЙКА)** для вызова меню настройки прибора.
- 2 В меню *Setup* коснитесь кнопки **SCREEN (ЭКРАН)**.
- 3 На экране *Screen* коснитесь кнопки **DATE/TIME (ДАТА/ВРЕМЯ)**.




- 4 В меню *Дата/Время (Date/Time)* коснитесь кнопки **SET DATE** для установки даты.
- 5 Используйте кнопки стрелок  и  для установки года, затем месяца и дня.
- 6 Когда вы введете все настройки, коснитесь кнопки  (OK) для сохранения или  (Отмена) чтобы отменить эту процедуру без сохранения даты. Программа автоматически вернется в меню *Дата/Время (Date/Time)*.


Если меню *Setup (Настройка)* появилось автоматически после включения прибора, вы должны нажать кнопку  для завершения первой установки даты.

- 7 Коснитесь кнопки  для возвращения в меню *Screen (Экран)*.



- 4 В меню *Date/Time* (*Дата/Время*), коснитесь кнопки **SET TIME** (установка времени).
- 5 С помощью кнопок  и  установите часы, а затем минуты.
- 6 После ввода настроек, коснитесь кнопки  (OK) для сохранения или  (Отмена) для отмены этой процедуру без сохранения. Программа автоматически вернется в меню *Дата/Время* (*Date/Time*)

Если меню появилось автоматически после включения измерителя, вы должны нажать кнопку  для завершения первой установки времени.

- 7 Коснитесь кнопки  для возвращения в меню *Screen* (*Экран*).

# Пояснение

- Данная процедура смены даты на приборе необходима в том случае, если у Ваших тест-полосок истекает срок годности, а их остаётся ещё достаточно много.
- После смены даты прибор будет принимать тест-полоски, не выдавая ошибки.
- **ВВ!** Допускается перенос даты и использование тест-полосок с истёкшим сроком не более, чем на 3 месяца (на данный срок изменение показателя МНО будет составлять 0,1-0,2 от истинного значения).
- IT система **анализы**, сделанные после переноса даты, будет **вносить в дату, которую Вы указали** на приборе, что определённым образом усложняет отчётность.
- Просьба при переносе даты на приборе сообщать в 1 ГКБ им. Е. Е. Волосевич г. Архангельска по эл. почте:  
[gemostas2007@gmail.com](mailto:gemostas2007@gmail.com)